

## TERMOMETRU DIGITAL CU AFIŞAJ LCD

Cod: D THERM01W




Vă mulțumim că ați ales un produs WELL! Vă rugăm citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos și să le păstrați la îndemână.

### Specificații

Interval de măsurare	32.0~42.9 °C
Precizie de măsurare	±1°C, 35.5~42.0 °C
	±2°C, sub 35.5 sau peste 42.0 °C
Afişaj	LCD, 3 ½ cifre
Alimentare	1x1.5V (baterie tip buton SR41 / UC392 / LR41)
Consum de putere	0.15 miliwatt în mod de măsurare
Viața bateriei	Peste 200 de ore de funcționare continuă
Dimensiuni	12.4x1.2x1.1 cm
Greutate	~ 10g incluzând bateria
Buzzer	~ 10 secunde după ce s-a luat temperature
Mediu de operare	Temperatură: 10~35 °C
	Umiditate relativă: 25%RH~80%RH
Condiții de stocare și transport	Temperatură: -25~55 °C
	Umiditate relativă: 25%RH~80%RH

### Instrucțiuni de utilizare

1. Ștergeți vârful de măsurare cu alcool etilic pentru dezinfectare. Apăsăți butonul ON/OFF lângă LCD. LCD va afișa  timp de 2 secunde și veți auzi simultan un bip.
2. Ultima temperatură va fi afișată pe ecran. Apoi ecranul va afișa valoarea de autotestare de 37.0°C. După aceea va afișa Lo °C.
3. Poziționați vârful de măsurare în cavitatea bucală, la subraț sau în anus. Este recomandată metoda de măsurare în cavitatea bucală; inserați vârful de măsurare în oricare dintre locațiile marcate cu senmul „√” pe figura de mai jos. Pentru a asigura exactitatea măsurătorii, țineți gura închisă timp de 5 minute înainte de luarea temperaturii.
4. După ce luarea temperaturii a luat sfârșit, semnalul de grade va înceta să mai pâlpâie



Aparatele electrice și electrocasnice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniți și să participați la protejarea resurselor naturale și a mediului înconjurător, prin predarea acestora la centrele de preluare, în vederea reciclării ecologice.

### Importator și distribuitor:

**SC VITACOM ELECTRONICS SRL**

CIF: RO 214527, 400495 Cluj-Napoca, Str. Bună Ziua FN, Tel: 0264-438401\*

[sales@vitacom.ro](mailto:sales@vitacom.ro), [www.vitacom.ro](http://www.vitacom.ro)